

Bandages de compression Felix Bühler – Champs d’application

- Prophylaxie lors des périodes d’immobilisation prolongées (par ex. immobilisation au box, transport)
- Régénération plus rapide après sollicitation
- Jambes gonflées
- Œdèmes liés à l’inactivité
- Soutien en cas de troubles chroniques du flux lymphatique
- Gonflements mous (non durcis)
- Lésions/Pathologies (chroniques) des tendons
- Après des lésions du boulet
- En post-opératoire pour prévenir les gonflements
- Œdèmes post-opératoires et post-traumatiques
- Après disparition d’un phlegmon aigu
- Après la disparition de cas légers de phlegmons chroniques
- Traitement des cicatrices
- Traitement de plaies avec pansement pour remplacer le bandage
- Ganglions (récents)

Bandages de compression Felix Bühler

Le canon antérieur (metacarpus)		I / XS	II / S	III / M
Mesures standard - Mesures en cm				
CD Circonférence milieu du canon	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	
CC Circonférence milieu du boulet	25,0 – 27,0	27,0 – 29,0	29,0 – 31,0	
Le canon postérieur (metatarsus)		II / S	III / M	IV / L
Mesures standard - Mesures en cm				
CD Circonférence milieu du canon	20,5 – 22,0	22,0 – 23,5	23,5 – 25,0	
CC Circonférence milieu du boulet	27,0 – 28,5	28,5 – 30,5	30,5 – 32,5	

Pour garantir un ajustement parfait, mesurez toujours les circonférences à l’état le plus mince (p. ex. après l’exercice) avec un mètre à ruban près du corps.

Bande de kinésiologie Felix Bühler pour chevaux

La pose de bandes lymphatiques est une thérapie complémentaire à la compression et convient notamment pour toutes les régions du corps sur lesquelles il n’est pas possible de poser un bandage de compression de manière efficace. La bande de kinésiologie Felix Bühler a été développée spécifiquement pour un usage vétérinaire. La couche de colle acrylique sans latex possède un très grand pouvoir adhésif et colle ainsi idéalement sur la peau du cheval. En outre, il est hypoallergénique, respirant et hydrophobe.



Krämer Pferdesport GmbH & Co. KG • Vierte Industriestraße 1+2 • 68764 Hockenheim • Germany

Julius Zorn GmbH • Juliusplatz 1 • 86551 Aichach • Germany • www.juzo.com

Hersteller / Manufacturer VetkinTape THYSOL Group BV • Midzomerweg 8 • 7532 SW Enschede • Netherlands

UN SOUTIEN INDÉFECTIBLE POUR LES JAMBES DES CHEVAUX

Bandages de compression Felix Bühler

FRA • 14290405/1/1 • 9401VT • 03/2019 • Sous réserve de modifications et d’erreurs.



Qu'est-ce qu'un bandage de compression Felix Bühler?

Les bandages de compression Felix Bühler se distinguent par un ajustement parfait sur le plan anatomique et une pression de compression définie avec exactitude. La circulation sanguine et le flux lymphatique sont stimulés et soutenus. Le liquide lymphatique et les toxines dans la jambe du cheval sont évacués plus rapidement.

Les bandages de compression Felix Bühler ont été développés sur la base de plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de la thérapie de compression appliquée aux humains.

L'efficacité des bandages de compression Felix Bühler se caractérise par une pression exercée depuis l'extérieur, laquelle diminue en continu du bas vers le haut. Les bandages de compression Felix Bühler activent et soutiennent le système lymphatique et favorisent l'évacuation active du liquide lymphatique. La jambe du cheval s'affine et est en meilleure forme.

En cas de problèmes comme les gonflements chroniques, les bandages de compression Felix Bühler peuvent être utilisés pour compléter une thérapie globale et pour soutenir le système lymphatique.

Le système lymphatique du cheval

En raison de leur taille et de leur anatomie, les chevaux possèdent un système lymphatique très complexe, qui traverse l'ensemble du corps parallèlement à la circulation sanguine. Le système lymphatique sert à soutenir le système immunitaire. Un cheval possède environ 8 000 ganglions lymphatiques, un être humain n'en possède que 400 à 600 environ, répartis dans tout le corps. Ce que l'on appelle le liquide lymphatique est généré par l'absorption de liquide, de protéines, de toxines et de débris cellulaires dans les tissus.

Les ganglions lymphatiques servent à filtrer cette lymphe et à la libérer des agents pathogènes, des corps étrangers et des cellules tumorales. Dans l'ensemble, le flux lymphatique du cheval est relativement lent et il est maintenu notamment grâce au mouvement. Si un cheval doit rester à l'arrêt pendant une période prolongée, cela peut entraîner des congestions dans le système lymphatique, ce qui peut se traduire par exemple par un gonflement des jambes. Pour soutenir le système lymphatique dans de tels cas, il est possible d'utiliser un bandage de compression Felix Bühler en plus d'exercices ou d'un drainage lymphatique. Attention: utiliser les bandages de compression Felix Bühler uniquement en l'absence d'une affection avec fièvre!

Un bon fonctionnement du système lymphatique est important pour la santé et le bien-être du cheval.

Bon à savoir sur les bandages de compression Felix Bühler

Quelle est la différence entre des bandages de compression Felix Bühler et des bandages (à enrouler) normaux?

En raison du tricot spécial et de la compression optimale, la circulation sanguine et le flux lymphatique sont stimulés et soutenus. Cela contribue à une régénération plus rapide des jambes du cheval. Les fermetures prédéfinies empêchent une pose trop serrée du bandage. Un « enchevêtrement » n'est pas possible.

Peut-il se produire une accumulation de chaleur sous le bandage de compression?

Non, grâce au matériau à mailles larges et respirant, aucune accumulation de chaleur ne peut se produire.

À quels intervalles les bandages doivent-ils être portés?

Il convient d'habituer lentement les chevaux qui portent un bandage de compression pour la première fois. Il est recommandé de commencer avec 1 heure, puis d'augmenter progressivement à 2, 4, 6, 8, 12 et 16 heures, jusqu'à 23 heures. Il faut garder le cheval sous surveillance. Certains d'entre eux s'habituent rapidement aux bandages, d'autres plus lentement.

