

EQUICAST

BANDAGE DE PROTECTION POUR SABOT



1



2



3



4



5



6



7

Le **bandage de protection pour sabot EquiCast** vise à protéger les sabots abîmés ou en mauvaise état. Il peut être utilisé aussi bien seul qu'en complément des sabots, semelles ou autres protections pour les sabots.

Ce bandage contient une résine spéciale, qui se durcit au contact de l'eau ou de l'humidité de l'air. Une fois durci, vous pouvez poser, clouer ou coller d'autres protections pour le sabot. Il est également possible de bander par dessus un fer.

- Se conserve jusqu'à 2 ans dans son emballage d'origine
- Respirant et antibactérien. Aucun besoin d'autre composant pour fixer le bandage.
- Protège le sabot en cas de fourbure.
- Convient idéalement comme moyen de transition après le déferriage.
- Sans fer et suivant l'utilisation, tient environ 4 semaines. Avec des fers, le temps d'une ferrure.
- Il est bien sûr possible de faire une radiographie du sabot à travers le bandage ou de prendre la température du sabot avec un appareil laser.
- Largeur: 75 mm, longueur: 3,6 m

Utilisation

Sortir le bandage de l'emballage à l'aide des gants. Le matériau est souple et se laisse facilement poser sur le sabot. Condition: le sabot doit être sec et propre.

Si vous humidifiez immédiatement le bandage, il vous reste environ 2 minutes pour le poser avant qu'il ne devienne dur. Vous avez cependant la possibilité de poser un bandage sec par dessus. Une fois le bandage posé, reposez le sabot. Relevez ensuite le sabot et mouillez-le bien avec une éponge ou un chiffon. Attendez 2 - 3 minutes et reposez le sabot. Remouillez. Terminé!

Si la sole du sabot est bien lisse, vous pouvez poser et clouer un fer.